

Chimerism

KITM

Remiss

Remiss finns att hämta på [Regionvasterbotten.se](https://regionvasterbotten.se).

Välj Chimerism som kan fyllas i och skrivas ut från vyn i datorn.

alternativt

Intranätet/ organisation och utveckling/ styrprocesser/ ledningssystem/
blanketthotellet/vårdblanketter/ remisser, välj "Remiss chimerism" (saknar UL nummer, kan fyllas i och skrivas ut från vyn i datorn).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör, lila propp

Provmaterial och provvolym:

Blod:	Minst 2x7 ml i EDTA-rör
Benmärg:	Minst 3 ml i EDTA-rör
Blod till DNA preparation inför allogen transplantation:	3x7ml EDTA-rör

- Kontrollera att provtagning sker på rätt patient och att uppgifter på rör och remiss är korrekta och överensstämmande. Signera på remiss att ID-kontroll är utförd.

- Intyga med namnteckning på remiss att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter (SOSFS 2009:29 (M)).

Provhantering

Provet ska transporteras så att det når laboratoriet senast torsdag em. Provtagning kan ej ske fredag eller dag före helgdag.

Provet ska transporteras så att det når laboratoriet provtagningsdagen eller närmast följande vardagar.

Förvaras i rumstemperatur eller kylskåp i väntan på transport. Får ej frysas eller centrifugeras.

Vid frågor kontakta Vävnadstypningslaboratoriet Norrlands Universitetssjukhus 090-785 37 84.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00086-2

Giltigt fr o m 2025-11-11

Chimerism

KITM

Indikation

Chimerismanalys utförs på blod eller benmärg från patienter som genomgått stamcellstransplantation, vid uppföljning och vid misstanke om relaps

Referensintervall, beslutsgräns

Vid mer än 1 % patientegna celler besvaras andel %.

Vid mindre än 1 % patientegna celler men ej sannolikt <0,1 % besvaras detta <1 %.

Om mycket låg andel patientegna celler påvisats besvaras detta <0,1 %.

"Ej påvisbar" innebär att inga patientegna celler kan påvisas med använd metod, vilket i praktiken innebär att andelen patientegna celler är <0,05 % respektive 0,5 %.

"Ej bedömbart" innebär att analysen ej fungerat tillfredsställande.

Interferens/felkällor

Rören får ej frysas eller centrifugeras.

Blandas väl för att undvika koagel.

Svarsrutiner

Analysen besvaras normalt inom 14 dagar.

Ackrediterad

Ja

Sparas i biobank

Ja, utgångsprover. Uppföljande prover sparas ej.

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se