

Bronkioloalveolär lavage (BAL)

Klinisk patologi

Remiss

Inom region Västerbotten:

RoS-"Klinisk Patologi"- "Lungcytologi"

Inom region Jämtland-Härjedalen:

Cosmic-"Patologi/ Cytologi"- "Cyt BAL"- "Bronkoalveolärt lavage"

Om tillgång till RoS eller Cosmic inte finns:

Umeå: Cytologi UL 681

Östersund: Allmän Cytologi/Punktion UL 1072

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial: rör, burk, flaska, se dokument [Provtagningsmateriel Patologi](#)

Provmaterial: sköljvätska från bronker

Provvolyt: samtlig sköljvätska

Provhantering

Provet insändes till laboratoriet ofixerat på is snarast möjligt.

Öppettider för telefon och provinlämning:

Mån-fredag: 08.00-15.30

Dag före röd dag, midsommar- och nyårsafton: 08.00-14.30

Röda dagar, samt helg: Stängt

Telefon: 090-785 28 92

Östersund: 063153317

Indikation

Bronchoalveolarsköljning och analys av sköljvätska används för att bedöma sjukdomsaktivitet och behov av terapi vid interstitiella spridda lungsjukdomar med hjälp av flödescytometri.

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00094-3

Giltigt fr o m 2026-02-03

Bronkioloalveolär lavage (BAL)

Klinisk patologi

Interferens/felkällor

Om för lång tid förflutit mellan provtagning och analys, samt om provet inte transporterats kylt kan resultatet påverkas

Svarsrutiner

För frågor angående svarstider, kontakta oss gärna på telefon 090-7853105

Kommentar

För rutiner kring specialanalyserna, se respektive anvisning ex. Immunfenotypning och molekylärgenetisk analys

Ackrediterad

Ja

Sparas i biobank

Ja

Synonymer

Lymfom, flödescytometri, immunfenotypning

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00094-3
Giltigt fr o m 2026-02-03