

Finnålspunktion

Klinisk patologi

Remiss

Inom region Västerbotten:

RoS-"Klinisk Patologi"- "Punktionscytologi"

RoS-"Klinisk Patologi"- "Macyt"

Inom region Jämtland-Härjedalen:

Använd remiss för berört organ

Om tillgång till RoS eller Cosmic inte finns:

Umeå: Cytologiremiss UL 681

Östersund: Allmän Cytologi/Punktion-remiss: UL 1072

Vid lymfommisstanke:

Inom region Västerbotten: RoS-"Klinisk Patologi"- "Hematopatologi Lymfom/Övrigt"

Inom Region Jämtland:

Cosmic-"Patologi/ Cytologi"- "Hematopatologi lymfom"

Om tillgång till RoS eller Cosmic inte finns:

Umeå: Hematopatologiremiss UL 238

Östersund: Hematopatologiremiss UL 1069

Obs! Ange i fixeringsrutan att det är färskt

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial:

-Objektglas med frostad yta.

Glaset märks med ROS etikett eller med personnummer på frostad yta.

Tänk på att lägga upp en lokalisation i taget och i samma ordning som ROS-beställningen. Lagg glasen först och sedan tillhörande rör (notera kommentar "som ovan" för tydlighet).

OBS! Pennan måste vara resistent mot alkohol och vatten.

-EDTA - rör, se dokument [Provtagningsmateriel Patologi](#)

Finnålspunktion som exstirperas måndag t o m torsdag:

Utstryk

Finnålspunktion av suspekt förändring görs på sedvanligt sätt, där det aspirerade materialet utblåses på ett rent objektglas med frostad ände. Materialet utstryks sedan med ett annat objektglas. Större

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Finnålspunktion

Klinisk patologi

partiklar kan utspridas genom att försiktigt "mosas" mellan glasen. Utstrykspreparaten får sedan lufttorka.

Cellsuspension

För att erhålla cellsuspension görs en finnålspunktion där innehållet i nålen aspireras in i provtagningsprutan med 1–2 mL steril fysiologisk koksaltlösning. Nålen tas bort och innehållet sprutas ned i ett EDTA rör.

Cystvätska

Cystvätska tappas i rör.

Vid lymfommisstanke

Prov insänds till laboratoriet i Umeå, så att analys kan utföras inom 24 timmar från provtagningsstillfället. Meddela hematopatologi-lab när prover ska skickas så att vi kan bevaka ankomsten. Tel.nr 090 – 785 25 42

Provhantering

De torra utstryksglasen placeras i preparataskar, därefter insänds glas, eventuella rör med cellsuspension / cystvätska och remiss snarast möjligt till lab

Cellsuspension och cystvätska förvaras i kylskåp i väntan på transport

Vid frågor tag kontakt med lab

Indikation

Utredning av eventuell malignitet i insänt material

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Interferens/felkällor

Ej relevant

Svarsrutiner

För frågor angående svarstider, kontakta oss gärna på telefon 090-7853105

Kommentar

OBS! Om prov insänds från olika lokalisationer **måste** glas och remiss uppge vilken lokalisation respektive glas är tagen ifrån.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00112-3

Giltigt fr o m 2026-02-03

Finnålspunkt

Klinisk patologi

OBS! Penna som används för måste vara resistent mot alkohol och vatten.

Ackrediterad

Lymfomdiagnostik: Ja

Cytologi: Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00112-3

Giltigt fr o m 2026-02-03