

Endomysium-antikroppar (IgA)

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum

Provvoly:

Blod 5 ml

Provhantering

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning. Kyltransport krävs ej.

Indikation

Celiaki, dermatitis herpetiformis.

Referensintervall, beslutsgräns

Semikvantitativ metod. Svaras ej påvisbar, svagt, medelstarkt eller starkt påvisbar.

Interferens/felkällor

IgA-brist kan orsaka falskt negativt resultat.

IgG-endomysium analys kan utföras på begäran vid känd IgA-brist.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Endomysium-antikroppar (IgA)

KITM

Svarsrutiner

Svar ges inom 2 veckor

Kommentar

Analysen utförs med indirekt immunofluorescens

Ackrediterad

Ja

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00149-3

Giltigt fr o m 2025-11-11