

# Immunglobulin G-subklasser: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

KITM

## Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

## ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

## Provtagning

**Provtagningsmaterial:**

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

**Provmaterial:**

Serum.

**Provolym:**

Blod 5 ml

Rekommenderad serummängd 100 µl/analys om möjligt (minimimängd 50 µl **serum**/analys.)

## Provhantering

Centrifugeras inom 4 h.

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Kyltransport krävs ej. Prov som måste förvaras på avdelning före transport bör förvaras i kylskåp.

## Indikation

Misstänkta immundefekter.

## Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: g/l.

Normalvärdena är åldersrelaterade, referensintervallet uppges i remissvaret.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

# Immunglobulin G-subklasser: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

KITM

## Interferens/felkällor

Lipemiska sera, sera förorenade med partiklar.

Monoklonala immunglobuliner (exempelvis myelom) kan ge upphov till felaktiga resultat. Hemolys i provet kan ge felaktigt resultat.

## Svarsrutiner

Svar inom en vecka

## Kommentar

Nefelometrisk analys

## Akrediterad

Ja

## Sparas i biobank

Ja

*Dokumentslut*

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på [regionvasterbotten.se](http://regionvasterbotten.se)