

Infliximab

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella, läkemedel

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

ID-kontroll

[För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provolym:

Blod 5 ml

Provhantering

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning. Kyltransport krävs ej.

Datum för senaste behandling med läkemedlet skall anges vid beställning.

Indikation

Koncentrationsbestämning av s-Infliximab under pågående behandling, samt analys av antikroppar mot läkemedlet vid terapivikt.

Referensintervall, beslutsgrens

S-Infliximab: Inget referensvärde anges, det rekommenderade terapeutiska intervallet varierar med behandlingsindikation. Se svarscommentar.

Antikroppar mot infliximab: Referensvärde (ej påvisade): <10 AU/ml

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Infliximab

KITM

Interferens/felkällor

Antikroppar mot infliximab kan endast analyseras vid mycket låga eller ej detekterbara serumnivåer (>0,7 µg/ml).

Svarsrutiner

Vid underhållsbehandling för IBD har serumkoncentration på 3-7 µg/ml (dalvärde) rekommenderats. Det terapeutiska intervallet vid andra sjukdomstillstånd kan skilja sig från detta.

(Referens: Vande Casteele N et al. Gastroenterology. 2015 feb 24.)

Analysen svaras ut inom 5-8 dagar

Kommentar

Analysmetod: infliximab-koncentration: Nefelometri

Infliximab-antikroppar: Lateral flow

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se