

Komplement C1q

KITM

Remiss

BoS: Finns att beställa under Kemi/Immunologi/Externa manuella

Beställare utan tillgång till BoS bör i första hand använda Labportalen, i andra hand pappersremiss (klinisk immunologi blå kant, art nr 14737).

Analysen ingår i paketet "Aktivitetskontroll vid reumatisk sjukdom".

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument ID-kontroll.

Provtagning

Provtagningsmaterial:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator (gul propp).

Provmaterial:

Serum.

Provvolyt:

Blod 5 ml. Rekommenderad minsta serummängd 100 µl/analys. Minimimängd för analys 50 µL/analys

Provhantering

Komplementfaktorer är mycket känsliga för nedbrytning därför måste provhanteringen följas noga. Venöst blod tas och skickas direkt till analys.

Transport:

Om provet dröjer tills det kommer till laboratoriet måste det centrifugeras inom 4 timmar och förvaras kylt. Transporteras kylt om det kan nå laboratoriet **inom ett dygn**.

I annat fall fryses serumet och transporteras fryst till laboratoriet.

Prover skickas må-to, ej dag före helg.

Indikation

Utredning av infektionsöverkänslighet, immunbristtillstånd, tillstånd med komplementkonsumtion (exempelvis vid ökad aktivitet av autoimmuna sjukdomar).

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Komplement C1q

KITM

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: mg/l. Referensintervall: 157-306 mg/l.

Interferens/felkällor

Felaktig provtagning, hantering och transport av provet. Kraftigt lipemiska prover kan ej analyseras. Hemolys i prov kan påverka resultatet.

Svarsrutiner

Svar ges inom en vecka.

Kommentar

Analysen utförs med nefelometrisk metod.

Ackrediterad

Nej

Sparas i biobank

Ja

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se