

Hud, immunofluorescens

Klinisk patologi

Remiss

Inom region Västerbotten:

RoS-"Klinisk Patologi"-"Generell Histo"

Inom region Jämtland-Härjedalen:

Cosmic-"Patologi/ Cytologi"-"PAD Hud/Subcutis"

Om tillgång till RoS eller Comic inte finns:

Umeå: Patologiremiss UL 208

Östersund: Patologiremiss UL 1071

Om ytterligare en biopsi tas (formalinfixerad) för sedvanlig rutindiagnostik ska en separat beställning/ remiss följa med det provet (se sökvägar/remissnummer ovan)

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial: se referens [Provtagningsmateriel Patologi](#) burk 70 ml, med gult skruvlock. Artikelnummer: 2496.

Provmaterial: vävnad

Kliniker inom NUS

Mån-tors: Biopsin placeras i NaCl, mängden NaCl ska vara riklig, minst halva burken. **Märk locket med ordet "IFL"**

Fredag och dag före röd dag: Biopsin placeras i burk med Michells lösning, mängden Michells lösning ska vara riklig, minst halva burken. Lösningen kan vid enstaka behov beställas från Hudmottagningen, NUS. **Märk locket med ordet "IFL"**

Övriga kliniker/sjukhus inom norra regionen

Biopsin placeras i burk med Michells lösning, mängden Michells lösning ska vara riklig, minst halva burken. Lösningen kan vid enstaka behov beställas från Hudmottagningen, NUS. **Märk locket med ordet "IFL"**

Provhantering

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00200-3

Giltigt fr o m 2026-02-04

Hud, immunofluorescens

Klinisk patologi

Prov i NaCl: Förvara provet i rumstemperatur. Lämnas över till laboratoriet så snart som möjligt. Endast möjligt att skicka i NaCl för kliniker inom NUS.

Prov i Michells lösning: Förvara provet i kylskåp om det inte skickas omgående till laboratoriet.

Alla prover som skickas i Michells lösning till klinisk patologi från övriga kliniker/sjukhus inom norra regionen ska hanteras kylt med hjälp av en kylklamp i försändelsen och vara tydligt märkta med "Kylhantering".

Om försändelsen riskerar att fördröjas över exempelvis en helg med anledning av transporttider som inte passar el dyl. så är det bättre att kylförvara provet på den egna enheten fram till möjlig transport.

Prov i Formalin: Förvara provet i rumstemperatur.

VIKTIGT:

Kliniken ska alltid ringa Klin. Patologi och meddela att IFL-prov förväntas anlända, oavsett medium. Tel. 090-7858912

Indikation

För utredning av autoimmun blåsdermatos, vaskulit, samt påvisande av Lupusband

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Interferens/felkällor

Det är av vikt att provet inte förvaras för länge i NaCl, provet måste därför nå laboratoriet samma dag som provet tas

Regeln för Michells lösning och formalin är minst 10 x vävnaden

Kända felkällor är för liten mängd transportmedium eller förvaring i fel temperatur

Svarsrutiner

För frågor angående svarstider, kontakta oss gärna på telefon 090-7853105

Ackrediterad

Nej

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Hud, immunofluorescens

Klinisk patologi

Sparas i biobank

Ja

Synonymer

Hud, IFL

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00200-3
Giltigt fr o m 2026-02-04