

Operationspreparat

Klinisk patologi

Remiss

Inom region Västerbotten:

RoS-"Operation" samt respektive vävnadsmaterial
RoS-"Klinisk Patologi"- "Generell histo"

Inom region Jämtland-Härjedalen:

Cosmic-Klinisk Patologi"-Använd remiss för berört organ

Om tillgång till RoS eller Comic inte finns:

Umeå: Patologiremiss UL 208

Östersund: Patologiremiss UL 1071

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#)

Provtagning

Provtagningsmaterial: burk, se dokument [Provtagningsmateriel Patologi](#)

Provmaterial: operationspreparat

Provhantering

Ofixerade preparatUmeå

Färska (ofixerade) prover lämnas på provinlämningen. Vid provinlämningen meddelas laboratoriet per telefon att material finns, invänta därefter personal till vilken provmaterialet överlämnas.

Tel.nr: 0907858912

Östersund

Färska (ofixerade) prover lämnas på laboratoriet

Tel.nr: 063153317

Fixerade preparat

Fixering: formaldehyd 4% med fosfatbuffert, 10 x vävnadsmängden.

Förvaring: rumstemperatur,

Öppettider:

Måndag-fredag 8:00-16:00

Med undantag för dag före röd dag samt dag innan midsommar-/jul-/nyårsafton: 8:00-15:00

Midsommar-/jul-/nyårsafton: Stängt

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Operationspreparat

Klinisk patologi

Indikation

Se respektive vävnadstyp

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant

Interferens/felkällor

Ej relevant

Svarsrutiner

För frågor angående svarstider, kontakta oss gärna på telefon 090-7853105

Kommentar

Vid behov av att lämna ofixerade preparat utanför laboratoriets öppettider ska det alltid meddelas i god tid innan klockan 16:00

Det är viktigt att vid fixering att den 4% buffrade formaldehyden täcker vävnaden. Regeln är 10 x vävnaden

Ackrediterad

Se respektive vävnadstyp

Sparas i biobank

Ja

Synonymer

Vävnadpreparat

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00249-3

Giltigt fr o m 2026-02-03