

Parotitvirus, PCR

Klinisk mikrobiologi

Remiss

BoS: Mikrobiologi / respektive provmaterial /övrigt agens PCR. Ange agens i remissen.

(Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi, rosa kant)

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Saliv, svalprov taget från parotiskörtels mynning:



E-swabrör rosa kork.

Artikelnummer: 5430

Urin och/eller Csv: Sterilt rör, minst 1 ml.

Provhantering

Kylförvaring. Skickas snarast möjligt. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla. CSV-prover får inte skickas i rörpost.

Indikation

Misstanke om akut parotit, orkit eller meningit orsakad av parotitvirus.

Vid immunitetsfrågeställning: se provtagningsanvisning för [Parotitvirus, serologi](#)

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant.

Interferens/felkällor

Ej relevant.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00293-4

Giltigt fr o m 2026-01-29

Parotitvirus, PCR

Klinisk mikrobiologi

Svarsrutiner

Analysen är en så kallad "sällan-analys" som körs vid förfrågan. Svar lämnas ut dagen efter det att analysen utförts. Vid önskan om snabbare svar vid vissa akuta frågeställningar, kontakta laboratoriet.

Provsvaret skickas ut som **har PÅVISATS** eller **har ej påvisats med realtids-PCR**.

Kommentar

Samtliga kliniskt sannolika fall av parotit bör analyseras med PCR och serologi parallellt.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Ja.

Synonymer

Påssjuka

Dokumentslut