

Amylas, pankreas, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Mag/Tarm.

Kortkod på etikett: AMYLPAN

Remiss: Laboratoriemedicin, Klinisk Kemi, Lycksele och Skellefteå, Remiss 5.

Remiss: Laboratoriemedicin, Remiss 1.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Li-heparin med gel (plasmarör), mintgrön propp.



Provmaterial: Plasma

Provvoly: Minimivoly 1 mL blod.

Provhantering

Centrifugeras inom 30 h.

Plasma hållbar 7 dygn vid 2 - 8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Vid längre förvaring fryses separerad plasma vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Misstanke om akut pankreatit.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00305-3

Giltigt fr o m 2026-01-29

Amylas, pankreas, P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: $\mu\text{kat/L}$

0 - 2 år	<0,39
2 - 15 år	0,10 - 0,60
15 - 18 år	0,16 - 0,80
> 18 år	0,15 - 1,10

Interferens/felkällor

Makroamylasemi (komplexbildning mellan amylas och antikroppar) kan ge förhöjd nivå utan pankreaspåverkan.

Behandling med Icodextrin-innehållande vätskor kan ge missvisande lågt resultat.

Korsreaktiviteten med salivamylas är låg men en mycket kraftig spottkörtelpåverkan kan möjligen medföra högre resultat.

Svarsrutiner

Analyseras vanligtvis dagligen, även jourtid.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en timme.

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Nej.

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00305-3

Giltigt fr o m 2026-01-29