

Epstein-Barr (EBV), PCR

Klinisk mikrobiologi

Remiss

BoS: Mikrobiologi / provmaterial

För externa kunder/kunder utan tillgång till BoS används i första hand LabPortalen, i andra hand pappersremiss (Klinisk mikrobiologi, rosa kant).

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Plasma: EDTA-rör 7 mL (blodvolym 6 mL) med lila kork. Minst 1mL helblod.

Serum: Serumrör 7 mL (blodvolym 5mL) med gel, guldgul kork. Minst 1mL helblod.

Observera att om önskemål finns om flera virusanalyser på samma plasma/serum-rör ska prov tas i ovan rekommenderade rör för att säkerställa att volymen räcker för samtliga analyser.

Centrifugerat och avhållt serum/plasma skickas i sterila plaströr.

Csv (likvor) skickas som det är i sterila plaströr. Minst 0,5mL.

Saliv och svalgprov samt **vävnad** skickas i ESwab-rör

Paraffinbäddad vävnad skickas snittat eller osnittat.

Provhantering

Kylförvaring. Skickas snarast möjligt. Transport utanför Norrlands Universitetssjukhus bör ske i kyla. CSV-prover får inte skickas i rörpost.

Om beräknad leveranstid till laboratoriet överstiger 24h från provtagning: Centrifugera serum- och EDTA-rör. Plasma från EDTA-rör hålls av till rör utan tillsats, ange på röret att det innehåller plasma.

Indikation

Oklar feber, lymfom/lymfoproliferativ sjukdom hos immunsupprimerade.

Reaktiveringsövervakning hos stamcellstransplanterade.

Encefalit, myokardit.

Vid frågeställning primär EBV (mononukleos) rekommenderas i första hand serologisk analys, se anvisning för Epstein-Barrvirus serologi.

Referensintervall, beslutsgräns

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Epstein-Barr (EBV), PCR

Klinisk mikrobiologi

Ej relevant.

Interferens/felkällor

Ej relevant.

Svarsrutiner

Analyseras vardagar. Svar vanligtvis samma dag.

Biopsier kan ta över en vecka att analysera.

Provsvaret skickas ut som **har PÅVISATS** eller **har ej påvisats med realtids-PCR**.

Kvantifiering utförs för plasma/serum och kvantitativt svar anges i IU/ml.

Kvantifiering utförs för CSV och kvantitativt svar anges i kopior/ml.

Övriga provmaterial kvantifieras ej.

Ackrediterad

Plasma, CSV, saliv, svalg: Ja

Övriga provmaterial: Nej

Sparas i biobank

Ja.

Synonymer

Mononucleos, mononukleos, körtelfeber

Dokumentslut