

CRP hs, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Hematologi/Inflammation.
Kortkod på etikett: P-CRP

Remiss: Laboratoriemedicin Klinisk Kemi, Lycksele och Skellefteå, Remiss 5.

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 1.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Li-heparin med gel (plasmarör), mintgrön propp.



Provmaterial: Plasma

Provvoly: Minimivoly 1 mL blod

Provhantering

Centrifugeras inom 30 h.

Plasma hållbar 7 dygn vid 2 - 8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Vid längre förvaring fryses separerad plasma vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Diagnostik och uppföljning av inflammation och infektion.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

CRP hs, P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: mg/L

< 3

Interferens/felkällor

Ej relevant

Svarsrutiner

Analyseras vanligtvis dagligen, även jourtid.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en timme.

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

C-reaktivt protein

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se