

Faktor VIII:C, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Koagulation.

Kortkod på etikett: F8-C

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 3

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Na-Citratrör, ljusblå propp.



Provmaterial: Citratplasma

Provvolym: Röret ska fyllas upp till markeringen på röret.

Provhantering

Centrifugeras inom 30 min efter provtagning.

Dubbelcentrifugeras, 2x10 min i 2000g.

Dubbelcentrifugerad plasma överförs till 5 mL plaströr och fryses in vid -20 °C eller lägre. Hållbar i 14 dygn.

Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Utredning av blödningbenägenhet, hemofili A.

Följa förloppet vid behandling med FVIII konzentrat, eller vid DIC-syndrom.

Som regel bör remiss skrivas för blödning- eller trombosutredning. Ställningstagande till analys av enskilda koagulationsfaktorer görs då av läkare, klinisk kemi.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00394-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

Faktor VIII:C, P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: kIE/L

0,5-1,5 kIE/L

Nivån bör ställas i relation till P-vWF.

Interferens/felkällor

Ej fyllda rör, pga utgången hållbarhetstid eller felaktig förvaring kan vakuumsug släppa.

NOAK/DOAK kan ibland ge falskt låga värden.

Svarsrutiner

Analyseras 1 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Tolkas av läkare, klinisk kemi tillsammans med övriga prover vid blödning- eller trombosutredning.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Koagulationsfaktor VIII:C

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00394-2

Giltigt fr o m 2026-01-30