

Faktor V, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Koagulation.

Kortkod på etikett: FAKT5

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 3

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Na-Citratrör, ljusblå propp.



Provmaterial: Citratplasma

Provvolym: Röret ska fyllas upp till markeringen på röret.

Minsta provvolym är 1 mL avhållt plasma. Om flera koagulationsfaktorer (II, V, VII, X, XI eller XII) ska analyseras i samma beställning tillkommer 0,5 mL per analyt.

Provhantering

Centrifugeras inom 30 min efter provtagning.

Dubbelcentrifugeras, 2x10 min i 2000g.

Dubbelcentrifugerad plasma överförs till 5 mL plaströr och fryses in vid -20 °C eller lägre. Hållbar i två veckor.

Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Koagulationsfaktorbrist där man redan uteslutit andra vanligare blödningsrubbningsar.

Som regel bör remiss skrivas för blödningsutredning. Ställningstagande till analys av enskilda koagulationsfaktorer görs då av läkare, klinisk kemi.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00396-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

Faktor V, P-

Klinisk kemi

OBS! Vid misstanke om APC-resistens ska denna analys inte beställas. Då beställs FV-mutation (FV-genotyp). Se FV-genotypning/Protrombingenotypning, Lkc-

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: kIE/L

0,7-1,2 kIE/L

Interferens/felkällor

Ej fyllda rör, pga utgången hållbarhetstid eller felaktig förvaring kan vakuumsug släppa.

Svarsrutiner

Analyseras 1 gång/vecka

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Tolkas av läkare, klinisk kemi tillsammans med övriga prover vid blödningsutredning.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Koagulationsfaktor V, Proaccelerin

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00396-2

Giltigt fr o m 2026-01-30