

Faktor XI, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Koagulation.

Kortkod på etikett: FAKT11

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 3.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Na-Citratrör, ljusblå propp.



Provmaterial: Citratplasma

Provvolym: Röret ska fyllas upp till markeringen på röret.

Minsta provvolym är 1 mL avhållt plasma. Om flera koagulationsfaktorer (II, V, VII, X, XI eller XII) ska analyseras i samma beställning tillkommer 0,5 mL per analyt

Provhantering

Centrifugeras inom 30 min efter provtagning.

Dubbelcentrifugeras, 2x10 min i 2000g.

Dubbelcentrifugerad plasma överförs till 5 mL plaströr och fryses in vid -20 °C eller lägre. Hållbar i två veckor.

Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Koagulationsfaktorbrist där man redan uteslutit andra vanligare blödningsrubbingar.

Som regel bör remiss skrivas för blödningsutredning. Ställningstagande till analys av enskilda koagulationsfaktorer görs då av läkare, klinisk kemi.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00398-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

Faktor XI, P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: kIE/L

0,7-1,2 kIE/L

Interferens/felkällor

Ej fyllda rör, pga utgången hållbarhetstid eller felaktig förvaring kan vakuumsug släppa.

Terapeutiska doser av hirudin eller andra direkta trombininhibitorer kan ge falskt lågt resultat. Detta gäller även nya FXI-hämmare.

Lupus antikoagulans kan påverka den uppmätta faktoraktiviteten.

Svarsrutiner

Analyseras 1 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Tolkas av läkare, klinisk kemi tillsammans med övriga prover vid blödningsutredning.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Koagulationsfaktor XI

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00398-2

Giltigt fr o m 2026-01-30