

Gallsyror, fP-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Mag/Tarm.

Kortkod på etikett: GALS

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 1.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Li-heparin med gel (plasmarör), mintgrön propp.



Provmaterial: Plasma

Provvolym: Minimivolum 1 mL blod

Patienten skall vara fastande över natten minst 9 timmar.

Från kl 22.00 dagen före provtagningen fram till efter provtagningen följande dag får endast vatten, te eller kaffe (utan socker, grädde eller mjölk) intas. Mediciner tas enligt läkarordination. Rökning, snusning och fysisk aktivitet bör undvikas.

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h.

Plasma hållbar 1 dygn i rumstemperatur, 7 dygn vid 2 - 8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Separerad plasma hållbar 1 månad vid -20 °C. Separerad plasma fryses vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00412-1

Giltigt fr o m 2025-11-18

Gallsyror, fP-

Klinisk kemi

Indikation

Leverfunktionsnedsättning.

Främst vid misstanke om graviditetskolestas.

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: $\mu\text{mol/L}$

< 10 $\mu\text{mol/L}$

Interferens/felkällor

Icke-fastande prov ger högre resultat.

Resultat är svårtolkat vid Ursofalk-behandling.

Ursodeoxycholsyra reagerar sannolikt (åtminstone delvis) vid analys.

Svarsrutiner

Analyseras 3 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom tre dagar.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00412-1

Giltigt fr o m 2025-11-18