

IL-6, P-

Klinisk kemi

Remiss

Endast beställning för neonatal provtagning i Cosmic för Umeå.

Finns att beställa under Hematologi/Inflammation.

Kortkod på etikett: P-IL-6

Beställning gällande andra patienter enbart efter överenskommelse med laboratoriet.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Microtainer rör Li-heparin med gel (plasmarör), mintgrön propp.



Provmaterial: plasma

Provvolym: minst 250 µL blod (max 600 µL)

Provhantering

Transporteras snarast till laboratoriet, där provet ska centrifugeras snarast.

Indikation

Misstanke om neonatal sepsis.

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: ng/L

Referensintervall anges ej.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00432-1

Giltigt fr o m 2025-11-19

IL-6, P-

Klinisk kemi

Interferens/felkällor

Inneliggande kärlkatetrar kan reta kärlvägg till lokal IL-6-produktion.

Aktivering av leukocyter *in vitro* kan leda till falskt förhöjda värden.

Högdosbehandling med biotin (>5 mg/dygn) kan störa analysen.

Vissa typer av antikroppar i patientprov kan störa analysen.

Svarsrutiner

Analyseras vanligtvis dagligen, även jourtid.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom tre timmar.

Kommentar

Mätintervall: 2 - 5000 ng/L

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Interleukin-6

Dokumentslut