

Lp(a), S-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Metabol/Hjärta.
Kortkod på etikett: LPA2

Remiss: Laboratoriemedicin, Remiss 2.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Serumrör med gel, (innehåller koagulationsaktivator), guldgul propp.



Provmaterial: Serum

Provvoly: Minimivoly 1,5 mL venblod.

Provhantering

Centrifugeras inom 8 h.

Serum hållbart 8 h i rumstemperatur och 48 h vid 2 - 8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Vid längre tids förvaring fryses avskilt serum vid -70 °C.

Indikation

Bedömning av risk för hjärt-kärl sjukdom, atheroskleros.

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: nmol/L

< 200 nmol/L

Ökad aterosklerosrisk vid nivåer > 45 nmol/L, särskilt i kombination med andra riskfaktorer.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Lp(a), S-

Klinisk kemi

Interferens/felkällor

Ej relevant.

Svarsrutiner

Analyseras 1 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Kommentar

Lp(a) är en oberoende riskmarkör för hjärt-kärl sjukdom och kan som sådan användas vid bedömning av risk för hjärt-kärl sjukdom. Analysen bör alltid användas tillsammans med sedvanliga lipidparametrar. Nivån av Lp(a) är huvudsakligen hereditärt bestämt och påverkas inte nämnvärt av lipidsänkande behandling.

Ackrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Lipoprotein (a)

Dokumentslut