

Progesteron, P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Endokrinologi.

Kortkod på etikett: PROG

Remiss: Laboratoriemedicin, Remiss 6.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Li-heparin med gel (plasmarör), mintgrön propp.



Provmaterial: Plasma

Provvolym: Minst 1 mL blod.

Alternativ då venös provtagning ej är möjligt: minst 400 mL blod i Microtainerrör med gel, mintgrön propp.

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h.

Plasma hållbart 2 dygn vid 2-8 °C. Separerad plasma hållbar 7 dygn vid 2-8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Vid längre förvaring fryses separerad plasma vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Indikation

Misstanke om anovulation, corpus luteum-insufficiens och vid utredning av vissa tumörer.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Progesteron, P-

Klinisk kemi

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: nmol/L

Män		< 0,5
Kvinnor	follikelfas	< 2,8
	ovulationsfas	0,4 - 38
	lutealfas	5,8 - 76
	postmenopausalt	< 0,4

(Postmenopausalt referensintervall tillämpas för kvinnor > 50 år.)

Interferens/felkällor

Högdosbehandling med biotin (>5 mg/dygn) kan störa analysen. Vissa typer av antikroppar i patientprov kan störa analysen.

Svarsrutiner

Analyseras vanligtvis dagligen, även jourtid.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom tre timmar.

Kommentar

Analysområde: 0,2 - 190 nmol/L

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Nej.

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00486-2

Giltigt fr o m 2025-11-07