

vWF:GP1bA (akt), P-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Koagulation.
Kortkod på etikett: VWFAKT

Remiss: Laboratoriemedicin, Remiss 3.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagningsmaterial: Na-Citratrör, ljusblå propp.



Provmaterial: Citratplasma

Provvoly: Röret ska fyllas upp till markeringen på röret.

Provhantering

Centrifugeras inom 30 min efter provtagning.
Prov som ska frysas dubbelcentrifugeras, 2x10 min i 2000g.

Plasma överförs till 5 mL plaströr.

Separerad plasma hållbar 8 h efter provtagning, i rumstemperatur eller kyla 4-8 °C.
Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Dubbelcentrifugerad plasma hållbar två veckor vid -20 °C eller lägre.
Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

vWF:GP1bA (akt), P-

Klinisk kemi

Indikation

Utredning av misstänkt von Willebrands sjukdom. Funktionellt test av vWF aktivitet.

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: kIE/L

0,50 - 1,87 kIE/L

Det finns en koppling till ABO-blodgruppssystemet, så att personer med blodgrupp O har lägre värden än de med annan blodgrupp (A, B eller AB).

I en studie med friska försökspersoner fann man följande nivåer:

Blodgrupp O: 0,44 - 1,41 kIE/L

Annan blodgrupp: 0,63 - 2,0 kIE/L

Interferens/felkällor

Ej fyllda rör, pga utgången hållbarhetstid eller felaktig förvaring kan vakuumsug släppa.

Svarsrutiner

Analyseras 1 ggr/vecka.

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Bedömning görs av läkare från klinisk kemi när provet är taget i samband med koagulationsutredning.

Kommentar

Ingår i blödningsutredning.

Vid misstanke om von Willebrands sjukdom skall alltid FVIII, vWF och vWF:GP1bA (akt) analyseras samtidigt för bedömningen.

1,0 kIE/L = 100 %.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00512-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

vWF:GP1bA (akt), P-

Klinisk kemi

Akrediterad

Nej.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

von Willebrand Faktor:GP1bA (aktivitet), P-, vWF (Ac), P-

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00512-2
Giltigt fr o m 2026-01-30