

Fosterdiagnostik missfall/intrauterin fosterdöd

Klinisk genetik

Remiss

UL-2002 Genetik Fosterdiagnostik [Remisser \(regionvasterbotten.se\)](mailto:Remisser@regionvasterbotten.se)

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning

Provtagning från foster/barn/placenta för genetik utförs i samband med obduktion på Klinisk Patologi NUS. Medsänd remiss UL-2002 *Genetik Fosterdiagnostik* till Klinisk Patologi tillsammans med foster/barn/placenta. Se provtagningsanvisning [Foster](#).




Provvolym/preparatstorlek: färsk vävnadsbiopsi på ca **3mm** i diameter i transportmedium.

Personuppgifter på modern och provmaterial anges på både provrör och remiss.

- Transportmediumrör rumstempereras innan provtagning.
- Prov från foster/barn önskas i första hand med biopsi från lunga eller mjälte.
- Prov från amnionhinna eller placenta tas om inget foster/barn anlönt eller annan anledning.

Transportmediumrör (RPMI med PEST) beställs/hämtas från Klinisk Genetik 090-785 28 00.

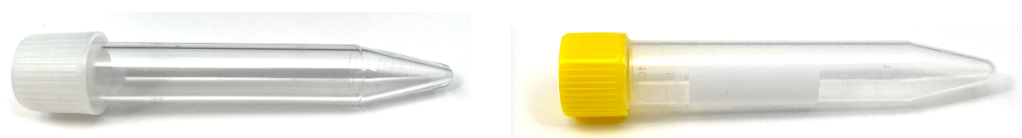

- Alternativt: sterilt rör med fysiologisk koksaltlösning (0,85%). Märk detta tydligt på röret.

Provhantering

Information till Klinisk Patologi NUS: Prov lämnas via Klinisk Patologi till Klinisk Genetik med tillhörande remiss så snart som möjligt efter provtagning. Remiss skrivs på moderns namn och personnummer. Om graviditetsvecka 22+0 och uppåt ska även personnummer på barnet anges på remissen.

Provförvaring: Rumstemperatur, får ej frysas eller utsättas för temperaturer över 37°C.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Fosterdiagnostik missfall/intrauterin fosterdöd

Klinisk genetik

Provtransport: Transporteras i rumstemperatur så att det når laboratoriet provtagningsdagen eller närmast följande vardag.

Indikation

Misstanke om genetisk avvikelse.

Referensintervall, beslutsgräns

Ej relevant.

Interferens/felkällor

Lång tid mellan avlidet foster/barn, provtagning och provets ankomst till laboratoriet kan innebära ett osäkert, missvisande eller misslyckat resultat på analysen. Om barnet avlidit i samband med förlossningen och därefter legat kallt, kan kromosomanalys lyckas från vävnadsbit, taget upp till 2–3 dagar efter förlossning.

Svarsrutiner

28 dagar.

Kommentar

I samtliga sjukvårdsregioner samlas vissa uppgifter in till det nationella kvalitetsregistret RaraSwed. Syfte är att utveckla och förbättra omhändertagandet för personer med sällsynta hälsotillstånd. För mer information, tala med din vårdpersonal eller vg sök på "RaraSwed" på [CSD samverkan](https://cldsamverkan.se) (cldsamverkan.se).

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Ja.

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se